



CVN 4 Tactical Responder Bandage

CE
0197

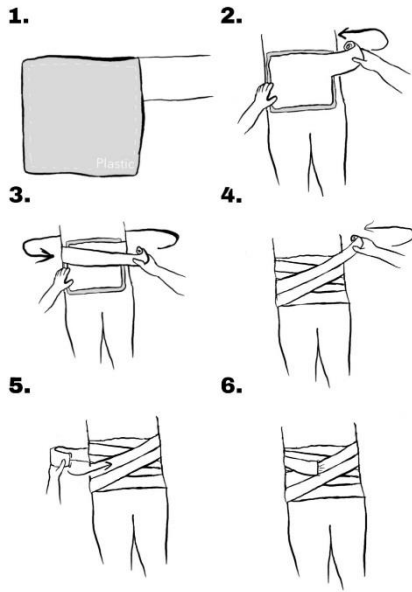

1. Siteessä on tarttumaton muovikalvo. Poista se tarvittaessa.
2. Aseta haavatyyny/ muovikalvo vamma-alueelle.
3. Kiedo sidos vartalon ympäri.
4. Kiedo sidos laaja-alaisesti vamma-alueelle.
5. Kiinnitä sidos kiinnikkeen avulla.
6. Varmista, että sidos on peittänyt vamma-alueen asianmukaisesti.

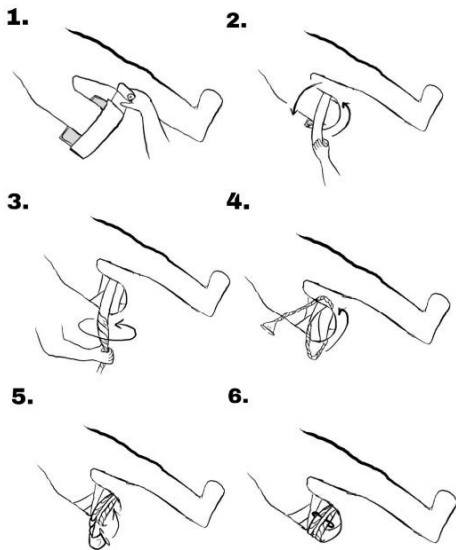


1. Aseta haavatyyny raajan tyngän päälle.
2. Kierrä sidosta raajan tyngän ympärille.
3. Tee sidoksesta ristisidoksia sidoksen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.
4. Mikäli käytössäsi ei ole kiristyssidettä, nyöritä sidoksen loppuosa kuvan mukaisesti.
5. Kiedo nyöritetty sidos tiukasti raajan ympäri.
6. Pujota kiinnike nyörityksen alta ja kierrä kiinnikettä, kunnes vuoto on hallinnassa.
7. Kiinnitä kiinnike sidokseen.

1.



2.

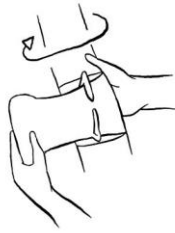

3.



4.



1. Aseta haavatyyny haavaa vasten ja kierrä side ruumiinosan tai raajan ympärille.
2. Vedä side painepalkin läpi ja kiristä.
3. Vedä sidettä lujasti taaksepäin vaihtaen sen kiertosuuntaa
4. Kierrä side tiukasti painepalkin yli ja ruumiinosan ympärille ristsidoksin peittäen haavatyynyn jokaisen reunan.
5. Kiinnitä sidos kiinnikkeen päissä olevista koukuista siteeseen.