




1 Col·loqui el coixinet sobre la ferida i empri l'embenat per embolicar la zona afectada

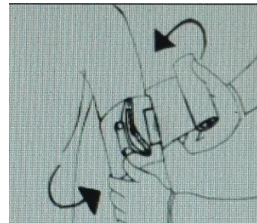


2 Introdueixi la bena a la forquilla de pressió

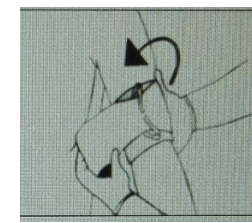


3 Premi l'embenat

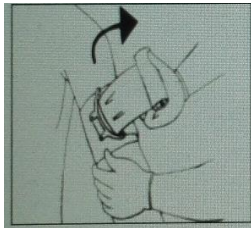

4 Estiri cap enrere amb força, tensant la forquilla de pressió sobre el coixinet

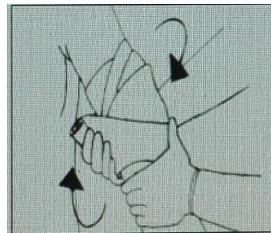

5 Emboliqui l'embenat amb fermesa, cobrint la forquilla de pressió i les vores del coixinet

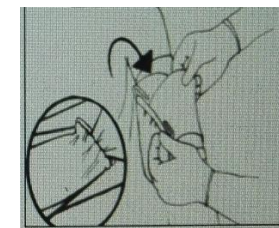

6 Asseguri l'embenat mitjançant el ganxo incorporat

7. Per retirar l'embenat tregui el ganxo de fixació