



CVN 8 Abdominal Bandage

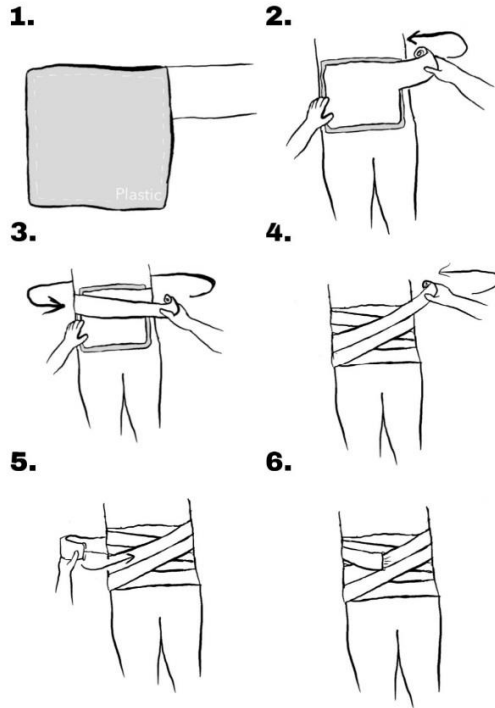

1. Siteessä on tarttumaton muovikalvo. Poista se tarvittaessa.
2. Aseta haavatyyny/ muovikalvo vamma-alueelle.
3. Kiedo sidos vartalon ympäri.
4. Kiedo sidos laaja-alaisesti vamma-alueelle.
5. Kiinnitä sidos kiinnikkeen avulla.
6. Varmista, että sidos on peittänyt vamma-alueen asianmukaisesti.

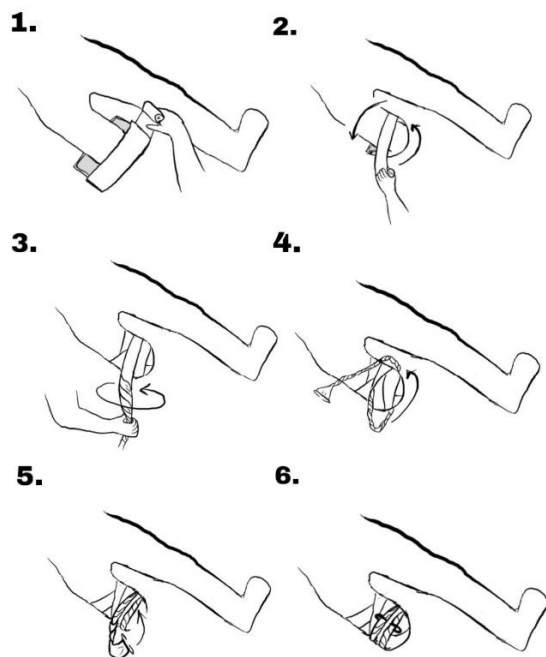

1. Aseta haavatyyny raajan tyngän päälle.
2. Kierrä sidosta raajan tyngän ympärille.
3. Tee sidoksesta ristsidoksia sidoksen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.
4. Mikäli käytössäsi ei ole kiristyssidettä, nyöritä sidoksen loppuosa kuvan mukaisesti.
5. Kiedo nyöritetty sidos tiukasti raajan ympäri.
6. Pujota kiinnike nyöriksen alta ja kierrä kiinnikettä, kunnes vuoto on hallinnassa.
7. Kiinnitä kiinnike sidokseen.

CE
0197